

386 81



## Mode d'emploi - Appareil de nettoyage auriculaire

### Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir opté pour l'un de nos produits de qualité ! Nous vous recommandons de suivre minutieusement les instructions suivantes et de conserver soigneusement le présent mode d'emploi.

### Description du produit

Cet appareil sert à extraire de l'intérieur de l'oreille l'excédent de cérumen en aspirant prudemment et de prévenir ainsi la formation de bouchons de cérumen et les infections. Les embouts en silicone fournis avec l'appareil permet de nettoyer de manière hygiénique et sûre les oreilles des adultes comme celles des enfants. L'appareil de nettoyage auriculaire peut également être utilisé sur des oreilles particulièrement sensibles. De format maniable, il est très simple à manipuler.

### Mise en service

- Ouvrez le compartiment à piles (cf. illustration 1) et insérez deux piles AA. Attention à bien respecter le sens de polarité (+/-) indiqué dans le compartiment à piles. Refermez le compartiment à piles.
- Placez l'un des quatre embouts en silicone sur l'appareil de nettoyage auriculaire (cf. illustration 2). Remplacez l'embout en silicone après chaque nettoyage d'oreille. Les embouts en silicone se nettoient facilement à l'eau claire.
- Mettez l'appareil de nettoyage auriculaire en marche (interrupteur en position « ON »). Introduisez l'appareil de nettoyage auriculaire dans l'oreille (pas trop profondément !). L'excédent de cérumen est alors prudemment extrait de l'intérieur de l'oreille par aspiration. Après chaque utilisation, éteignez l'appareil (interrupteur en position « OFF » ; cf. illustration 3).

### Nettoyage

- Tournez le réservoir collecteur dans le sens de la flèche (cf. illustration 1) puis retirez-le de l'appareil.
- Nettoyez le réservoir collecteur et l'extracteur au moyen du pinceau fourni avec l'appareil (cf. illustration 2).

### Mise en garde

Une utilisation incorrecte ou inappropriée de l'appareil peut provoquer des blessures physiques, des dégâts matériels ou endommager l'appareil.

- Ne laissez pas l'appareil à portée des enfants.
- Rincez soigneusement l'embout en silicone à l'eau claire après chaque utilisation.
- Retirez les piles de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

### Informations techniques

Tension d'alimentation : 2 piles de 1,5 V -- modèle AA, Poids : 99 g

### Attention : Informations importantes concernant les piles

- Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines si vous souhaitez bénéficier d'une prestation optimale de votre appareil.
- N'utilisez jamais des piles déjà utilisées avec des piles neuves ni des accumulateurs rechargeables avec des piles jetables !
- De même, n'utilisez pas de piles de différents modèles (piles alcalines avec piles charbon-zinc par exemple).
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une durée prolongée, car une fuite d'électrolyte risquerait d'endommager durablement l'appareil.

### Indications relatives à l'élimination des piles :

L'élimination des piles est régie par des directives légales. Les piles usagées doivent être éliminées dans des collecteurs appropriés, se trouvant par exemple dans certaines grandes surfaces. Les piles ne doivent sous aucun prétexte être jetées avec les ordures ménagères ou le sac jaune. Jetez les piles uniquement lorsqu'elles sont totalement vides. Lorsque vous utilisez des piles, faites bien attention à ne pas provoquer de court-circuit (en court-circuitant les pôles par exemple).

### Consignes de sécurité

**Information importante :** La garantie du produit est annulée en cas de dommage provoqué par le non-respect du mode d'emploi. Dans ce cas, Maximex GmbH & Co. KG décline toute responsabilité.

- Utilisez l'appareil uniquement avec la tension indiquée.
- Si vous procédez à des réparations, utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine pour éviter tout dommage.
- Nous vous informons que les perturbations survenant pendant l'exploitation ou le raccordement de l'appareil échappent au domaine d'influence de Maximex GmbH & Co. KG et que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages en résultant.
- Pour cette raison, nous vous recommandons de toujours vérifier que l'appareil est approprié à l'environnement d'exploitation dans lequel vous souhaitez l'utiliser.

### Informations générales

- Conservez les appareils électriques et les matériaux d'emballage etc. hors de portée des enfants.
- Respectez les conditions écologiques en vigueur pour l'élimination des emballages et des matériaux usagés.
- Ne cédez pas l'appareil ni le mode d'emploi à un tiers.
- Sous réserve de modification du design et des données techniques (au sens d'une amélioration constante du produit).

### Garantie

L'appareil est garanti deux ans. La garantie comprend la réparation de toutes les pannes non occasionnées par un défaut de matériel ou de production. Les pièces d'usure sont exclues de la garantie. Maximex GmbH & Co. KG n'ayant aucune influence sur l'exactitude du montage ni l'exploitation correcte de l'appareil, la garantie s'applique uniquement aux appareils complets utilisés dans des conditions appropriées. Maximex GmbH & Co. KG exclut toute responsabilité et toute garantie pour les dommages ou dommages consécutifs résultant de l'utilisation du produit, notamment en cas de modification ou de réparation de l'appareil, de modification des circuits ou d'utilisation de pièces de rechange autres que les pièces de rechange d'origine, ou enfin en cas de dommage occasionné par une utilisation incorrecte, négligente ou inappropriée.

### Informations relatives à la protection de l'environnement

Lorsque la durée de vie de l'appareil est écoulée, ce dernier ne doit en aucun cas être jeté avec les ordures ménagères. Déposez l'appareil dans un centre de collecte spécialisé dans l'élimination des appareils électriques et électroniques. Ce symbole, que vous retrouverez sur l'appareil, dans le manuel d'utilisation et sur l'emballage, vous le rappelle. De cette manière, les matériaux peuvent être recyclés conformément à leur identification. En permettant le recyclage de matériaux et la remise en état d'appareils usagés, vous contribuez activement à la protection de l'environnement. Veuillez vous informer auprès des autorités locales de l'emplacement des centres de collecte des appareils recyclables.

