

DIGIPHOT®

optic



Digital - Lupe
DM - 50

Inhaltsverzeichnis

Vorsichtsmaßnahmen	04
Überblick	05
Inhalt der Verpackung	05
Bezeichnungen & Funktionen	06
Sicherheit & Wartung	07
Inbetriebnahme	08
Laden der Batterie	08
Lesen mit der Digital - Lupe	09
Verwendung der Digital - Lupe	10
Ansichtsmodus	10
Einstellung der Vergrößerung	10
Standbild	10
Einstellung der Helligkeit	11
Niedrige Batterieanzeige	11
Schreiben mit der Digital - Lupe	12
Anschluss der Digital - Lupe an ein Fernsehgerät	13
Garantie	14

Herzlich Willkommen

Vielen Dank für den Kauf der ultrakompakten mobilen Digital - Lupe. Benutzen Sie die DM - 50 zum Lesen, Schreiben, Anschauen von Landkarten, Speisekarten usw. Wir hoffen, dass Sie viel Freude mit der Digital - Lupe haben.

Diese Anleitung bietet Ihnen eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen der DM - 50. Bilder in der Anleitung können von dem Produkt abweichen. Digiphot behält sich alle Rechte am Inhalt vor. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor dem ersten Gebrauch der DM - 50 und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch an einem sicheren Platz auf.

Vorsichtsmaßnahmen

FCC - Hinweis

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B, gemäß Artikel 15 der FCC-Bestimmungen.

Diese Grenzwerte gewährleisten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnumgebung.



Überblick

Inhalt der Verpackung



- 1) Digital - Lupe
- 2) Tragetasche
- 3) AC - Adapter (Netzteil)
- 4) Video Kabel (für den Anschluß am Fernseher mit AV Eingang)
- 5) Computer Kabel (Anschluß über USB)
- 6) Mikrofasertuch
- 7) Handschlaufe

Bezeichnungen & Funktionen

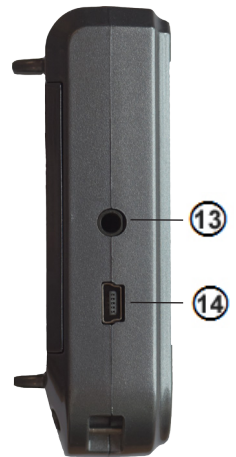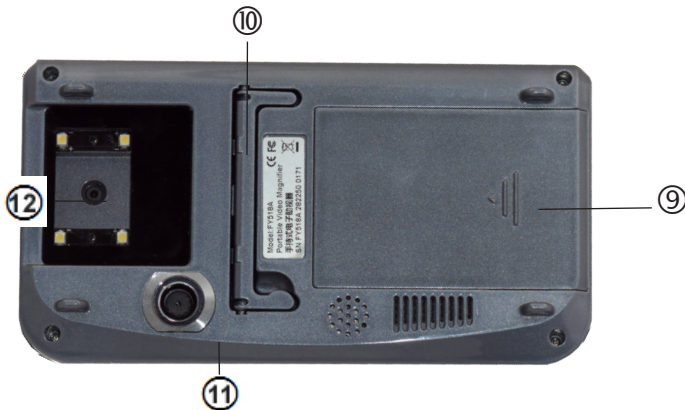

- 1) 5" Display
- 2) Batterieladeanzeige
- 3) An- und Ausschalt Taste
- 4) Standbild Taste
- 5) Video Modus
- 6) Fadenkreuz
- 7) Vergrößerungstaste
- 8) Verkleinerungstaste
- 9) Batteriefach
- 10) Standfuß
- 11) Kameraobjektiv für Fern
- 12) Kameraobjektiv für Nah
- 13) Videoanschluss
- 14) Netzanschluss

Sicherheit & Wartung

Um Ihre Lupe in gutem Zustand zu halten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:


1. Lesen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung zu diesem Produkt, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
2. Versuchen Sie nicht, die Lupe zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Dieses Produkt enthält keine zu wartenden Teile.
3. Halten Sie die Lupe von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern.
4. Benutzen Sie die Lupe immer an einem Ort, an dem die Temperatur zwischen 10°C und 50°C liegt.
5. Bewahren Sie die Lupe immer an einem Ort auf, an dem die Temperatur zwischen 0°C und 65°C liegt.
6. Versuchen Sie nicht, andere Stecker in den Video - Anschluss zu stecken. Alle entsprechenden Stecker sollten leicht in den Anschluss passen.
7. Verwenden Sie nur das Netzteil, das mit der Lupe geliefert wurde, um den Akku aufzuladen. Andere Netzteile können das Gerät beschädigen.



Bitte vor dem Laden der Batterie die Schutzfolie vom Akku im Batteriefach entfernen!

Laden der Batterie

Bevor Sie die Lupe in Gebrauch nehmen, müssen Sie die Batterie laden.




1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in den USB Anschluss ⑭ auf der linken Seite des Geräts. Schließen Sie dann das andere Ende des Netzteils an eine Steckdose an. Die LED - Akkuanzeige ② an der Vorderseite des Gerätes leuchtet rot auf, um zu zeigen, dass der Akku geladen wird. Beim Erstgebrauch kann die Ladezeit bis zu 10 Stunden betragen.
2. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED grün. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Die LED - Anzeige erlischt.
3. Nun können Sie die Digital - Lupe für ca. 4 Stunden verwenden. Ein schwacher Batteriezustand wird durch ein rotes Batteriesymbol  am linken Bildrand angezeigt. Dann müssen Sie das Netzteil anschließen, um die Batterie aufzuladen.

Hinweis:

Schalten Sie die Digital - Lupe während des Ladevorgangs immer aus. Der Akku wird nicht aufgeladen, wenn der Bildschirm eingeschaltet bleibt.


Lesen mit der Digital - Lupe

Um mit der Lupe zu lesen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie das Gerät ein, in dem Sie die An- und Ausschalt Taste ③ (auf der obereren linken Seite des Geräts) 3 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Legen Sie die Lupe flach auf den Text, den sie lesen möchten.
3. Positionieren Sie das Fadenkreuz + das sich direkt unter der Video - Modus Taste ⑤ befindet, an der Stelle, an der Sie zu lesen beginnen möchten. Alles was sich unter diesem Fadenkreuz befindet, wird auf dem Bildschirm angezeigt und vergrößert.
4. Schieben Sie die Digital - Lupe allmählich nach rechts, bis zum Ende der Zeile, die Sie lesen. Schieben Sie das Gerät nach unten und wieder nach links, um die nächste Textzeile zu lesen.
5. Um die Stärke der Vergrößerung zu ändern, drücken Sie die Vergrößerungstaste  oder die Verkleinerungstaste .
6. Um die auf dem Bildschirm verwendeten Farben zu ändern, drücken Sie die Video - Modus Taste  bis Sie den Modus erhalten, der für Sie zum Lesen am besten geeignet ist.
7. Um das aktuelle Bild angezeigt zu lassen, drücken Sie die Standbild Taste ④ (auf der obereren rechten Seite des Geräts). Drücken Sie diese erneut, um das Einfrieren aufzuheben.
8. Die Digital - Lupe schaltet sich automatisch nach 3 Minuten ab, sofern diese nicht in Gebrauch ist.
9. Schalten Sie das Gerät aus, sobald Sie mit dem Lesen fertig sind, in dem Sie die An- und Ausschalt Taste ③ (auf der obereren linken Seite des Geräts) 3 Sekunden lang gedrückt halten.



Verwendung der Digital - Lupe

Video - Modus


Drücken Sie die gelbe Video - Modus Taste  um zwischen 14 verschiedenen Farb - Modi zu wählen. Diese sind wie folgt.

- Vollfarbe
- Graustufen
- Weiß auf Schwarz
- Schwarz auf Weiß
- Weiß auf Blau
- Blau auf Weiß
- Gelb auf Schwarz
- Schwarz auf Gelb
- Gelb auf Blau
- Blau auf Gelb
- Rot auf Schwarz
- Schwarz auf Rot
- Grün auf Weiß
- Weiß auf Grün




Einstellung der Vergrößerung

Drücken Sie die  Taste um die Vergrößerung zu erhöhen und die  Taste um zu verkleinern.


Standbild


Drücken Sie die Standbild Taste  um zwischen dem Standbild und dem Aufheben des eingefrorenen Bildes zu wechseln. Während des Standbildes stehen die Funktionen der Vergrößerung und der Farb - Modi ebenfalls zur Verfügung.




Fokus für Fern und Nah (Wechsel des Objektivs)

Wenn Sie mit der Digital - Lupe weiter entfernte Objekte sehen möchten, halten Sie die Standbild Taste  2 Sekunden lang gedrückt, um das Objektiv zu wechseln. In der oberen rechten Ecke des Fensters erscheint dann das  Symbol. Nun können Sie die Digital - Lupe hochnehmen und das Objekt Ihrer Wahl fokussieren (z.B. Fahrpläne etc). Wenn Sie den Fern Fokus beenden möchten, halten Sie die Standbild Taste  wieder 2 Sekunden lang gedrückt.


Einstellung der Helligkeit

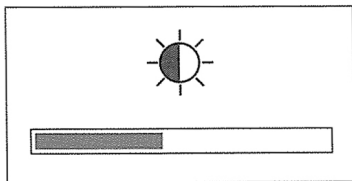Halten Sie die gelbe Video - Modus Taste  3 Sekunden lang gedrückt und die Helligkeit wird in der Fortschrittsanzeige angezeigt.




Drücken Sie die Vergrößerungstaste  um die Helligkeit zu erhöhen und die Verkleinerungstaste  um die Helligkeit zu verringern. Um die Einstellung der Helligkeit wieder zu verlassen, drücken Sie die Video - Modus Taste  erneut.

Einstellung der Lautstärke

Drücken Sie die gelbe Video - Modus Taste  3 Sekunden lang gedrückt.

Um den Kontrollton ein- bzw. auszuschalten, drücken Sie die Standbild Taste ④. Wenn das Lautsprecher Symbol auf der rechten Seite des Displays erscheint, bedeutet das, dass der Ton an ist ansonsten ist er aus.

Batteriezustandsanzeige

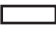Wenn die Batterie schwach ist, erscheint das  Symbol auf der unteren linken Seite des Bildschirms. Dieses zeigt an, dass die Batterie wieder aufgeladen werden muss.

Um die Batterie zu schonen, schalten Sie die Digital - Lupe bitte immer aus, wenn Sie diese nicht verwenden.

Schreiben mit der Digital - Lupe

Wenn Sie die Lupe zum Schreiben verwenden möchten, gibt es einen Standfuß ⑩ auf der Unterseite des Geräts. Dieser Fuß hebt einen Teil des Geräts. Egal was Sie schreiben, Sie können dieses auf dem Bildschirm der Digital - Lupe sehen.




Um den Standfuß zu verwenden, gehen sie folgendermaßen vor:

1. Drehen Sie das Gerät um. Der Standfuß befindet sich in einer Vertiefung zwischen dem Kameraobjektiv und dem Batteriefach.
2. Legen Sie Ihren Finger in die Mulde neben dem Standfuß.
3. Klappen Sie den Standfuß heraus und schwenken Sie diesen bis zum Anschlag.
4. Drehen Sie das Gerät wieder um und stellen Sie dieses auf eine gerade Oberfläche. Nun können Sie mit der Vorlage die vergrößert werden soll, schreiben oder arbeiten.
5. Wenn Sie mit der Lupe lesen möchten, drücken Sie den Standfuß wieder nach unten in die Vertiefung.

Anschluss der Digital - Lupe an ein Fernsehgerät

Wenn Sie einen größeren, als den eingebauten 5" Bildschirm benötigen, können Sie das Gerät mit dem beiliegenden Videokabel an einen Fernseher anschließen. Um Ihre Digital - Lupe an ein Fernsehgerät anzuschließen, gehen Sie folgendermaßen vor:

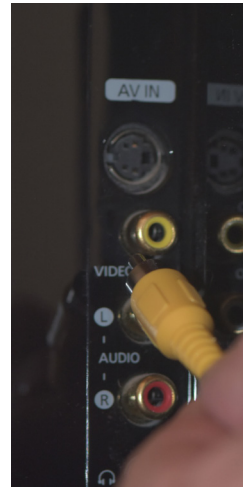


1. Stecken Sie den schwarzen Klinkenstecker des mitgelieferten Videokabels in den Video-Anschluss der Digital - Lupe.
2. Stecken Sie den gelben Klinkenstecker am Videokabel in eine der gelben Video - Eingangsbuchsen Ihres Fernsehgeräts. In dem Handbuch Ihrer Fernsehgeräts finden Sie weitere Informationen für das Auffinden dieser Anschlüsse
3. Schalten Sie den Fernseher ein. Stellen Sie gegenfalls Ihren Fernseher auf den entsprechenden Eingangskanal ein. Texte / Vorlagen die Sie vergrößern, erscheinen nun auf dem Fernsehbildschirm.

Garantie

Jedes Digiphot Produkt wird sorgfältig geprüft und ist frei von Material- oder Fertigungsfehlern. Für dieses Produkt gewähren wir eine Garantie von 24 Monaten und für den Akku 6 Monate.

Die Garantie erlischt, wenn das Gerät unsachgemäß behandelt wurde oder unautorisierte Personen einen Reparaturversuch unternommen haben, bzw. das Gerät von unauthorisierten Personen geöffnet wurde.

Dieses Symbol, welches auf dem Produkt oder in der Betriebsanleitung aufgedruckt ist, bedeutet, dass das elektrische bzw. elektronische Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU.

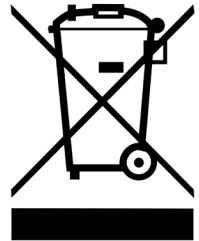

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wenn Sie trotz unserer ausführlichen Beschreibung ein Problem mit der Digital - Lupe haben, nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit unserer Service - Hotline auf.

Diese erreichen Sie von Montag bis Freitag von 8:00 - 17:00 Uhr unter der Rufnummer:

+49 (0) 3591 2722 4801

oder per Mail unter:

service@digiphot.eu

Bitte beachten Sie, dass Rücksendungen nur nach vorheriger Absprache und Erteilung einer RMA - Nummer möglich sind.

Wir entscheiden dann nach Prüfung des fehlerhaften Produkts, ob ein Austausch, ein Teilersatz oder eine Reparatur durchgeführt wird. Wir haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

DIGIPHOT®

DIGIPHOT e.K.

Geiselhof 7

D 92272 Freudenberg

☎ +49 (0) 96 27 - 9 12 18

Fax: +49 (0) 96 27 - 9 12 19

Email: info@digiphot.org

DIGIPHOT® **Luxembourg S.à.r.l.**

9bis rue Basse

L-4963 Clémency

Luxembourg

Tél : +352 24514713

Fax : +352 24611677

Mail : info@digiphot.eu

www: digiphot.eu