

DIE HÖHLE DER
LÖWEN
BEKANNT AUS DER
VOX
GRÜNDER-SHOW

aspUraclip

Jederzeit und überall einsetzbar:
ZU HAUSE, IM BÜRO UND AUF REISEN

aspUraclip med ist ein Mini-Inhalator für die Nase. Mit jedem Atemzug verströmt er eine wohltuende Kombination aus Eukalyptus, Thymian und Ravensara. Diese ätherischen Öle regen die Nasenschleimhäute an. Die Wirkung der natürlichen Inhaltsstoffe kann Erkältungssymptome abmildern.

- ✔ **Nasenclip mit 100 % ätherischen Ölen:**
einfach anclippen und ganz normal weiteratmen
- ✔ Mit jedem Atemzug verströmt er eine erfrischende Kombination aus Eukalyptus, Thymian und Ravensara
- ✔ Aus Silikon: elastisch und angenehm zu tragen
- ✔ Aufbewahrung in wiederverschließbarer Spezialverpackung

Inhaltsstoffe:

Der Inhaltsstoff im Speicher (2 x 0,045 ml) ist ein Gemisch aus Eukalyptus-, Thymian- und Ravensaraöl.

Anwendungsgebiete:

- Zur Erleichterung der Nasenatmung bei Erkältungen
- Lindert die Beschwerden bei erkältungsbedingtem Schnupfen und häufig wiederkehrenden Infektionen der oberen Atemwege

Warnhinweise: aspUraclip med darf nicht angewendet werden:

- Wenn Sie Überempfindlich (allergisch) gegen Eukalyptusöl oder einen der sonstigen Bestandteile sind.
- Bei Asthma und anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen.
- In der Schwangerschaft oder Stillzeit.
- Bei Säuglingen und Kindern unter 6 Jahren.

*** Bis zu 3 Wochen verwendbar**


- Nach Anbruch der Packung kann aspUraclip med bei einem Einsatz von 1–2 Stunden täglich bis zu 21 Tage lang verwendet werden, wenn er im mitgelieferten Behälter aufbewahrt wird und dieser stets gut verschlossen ist.
- Das Verfallsdatum ist auf die Verpackung aufgedruckt. Es bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Verwenden Sie den Mini-Inhalator nicht mehr nach diesem Datum.

Weitere Produktinformationen innenliegend.



Hersteller:
aspUraclip GmbH
Mittelstraße 7
12529 Berlin-Schönefeld
Deutschland
www.aspuraclip.com

Designed in
Deutschland.

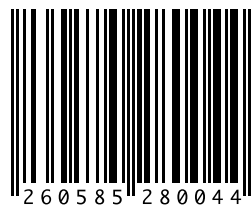

DIE HÖHLE DER
LÖWEN
BEKANNT AUS DER
VOX
GRÜNDER-SHOW

aspUraclip

MINI-INHALATOR

Jederzeit und überall einsetzbar:
ZU HAUSE, IM BÜRO UND AUF REISEN


med

Bis zu
3 Wochen
verwendbar*

Mit 100% ätherischen Ölen aus
Eukalyptus, Thymian und Ravensara

**LINDERT
ERKÄLTUNGSBESCHWERDEN**

Löst die verstopfte Nase

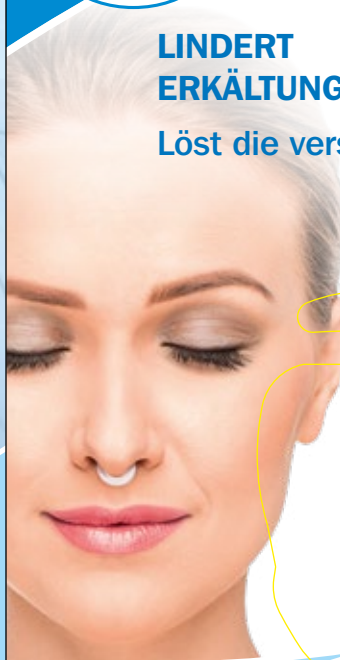

EINFACH WIEDER DURCHATMEN!

Duftrichtung:
Eukalyptus, Thymian
und Ravensara

Gebrauchsanleitung für Anwender

med

Wie ist aspUraclip med anzuwenden?

Verwenden Sie **aspUraclip med** immer genau nach der Anweisung in dieser Anleitung. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Befreien Sie ggf. Ihre Nase von Schleim und führen Sie den Mini-Inhalator – wie auf der Abbildung zu sehen – in die Nasenöffnungen ein. Atmen Sie dabei ganz normal weiter.

aspUraclip med ist ein Einmalprodukt. Sie können die Anwendung jedoch unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Zwischen den Anwendungen sollten eventuell anhaftende Sekret-Spuren mit einem Tuch entfernt werden. Bei Bedarf kann auch ein Desinfektionstuch verwendet werden.

Nach Anbruch des Behälters sollten Sie den Mini-Inhalator nicht länger als 21 Tage lang verwenden. Der Mini-Inhalator dient Ihrem persönlichen Gebrauch und sollte nicht weitergegeben werden.



aspUra clip



Welche Nebenwirkungen sind möglich?

- Reizungen der Nasen- und/oder Augenschleimhaut während der Anwendung sind möglich. Die Häufigkeit ist nicht bekannt.
- Bei überempfindlichen Patienten wurde von Hustenreiz, Atemproblemen (Apnoe), Bronchial- oder Kehlkopfkrampf berichtet. Die Häufigkeit ist nicht bekannt.
- Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln wurden nicht untersucht. Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.
- Für die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.

Was ist beim Auftreten von Nebenwirkungen zu tun?


Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, setzen Sie das Präparat zunächst ab und halten Sie gegebenenfalls Rücksprache mit Ihrem Arzt. Sollten Sie allergische Reaktionen der Atemwege (Schwellungen im Gesicht, Mund- und/oder Rachenraum, akute Atemnot) bei sich beobachten, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Gebrauchsanleitung aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte einem Arzt oder Apotheker mit.

Wie ist aspUraclip med aufzubewahren?

- Bewahren Sie den Mini-Inhalator stets im mitgelieferten Behälter auf und halten Sie diesen gut verschlossen.
- Lichtgeschützt und nicht über 25 °C lagern.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Diese Gebrauchsanleitung wurde zuletzt im Juni 2018 überarbeitet und ist online verfügbar auf

www.aspuraclip.com

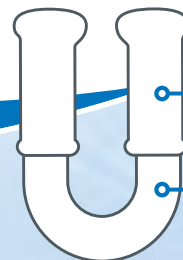

Speicher mit 100%
ätherischen Ölen

Hoher Tragekomfort:
elastisches Silikon und
anatomisch angepasste Form