

NATURE'S ANSWER TO BREATHING EASIER

INHÄLO : DSI™

DRY SALT INHALER


100% NATUURLIJK

NASAL

TROCKENSALZ INHALATOR
VOOR DE BEHANDELING VAN
DE BOVENSTE LUCHTWEGEN

BEVAT 90 DAGEN BRUIKBARE
ZOUTCARTOUCHE EN AROMASTICK

NIEUW

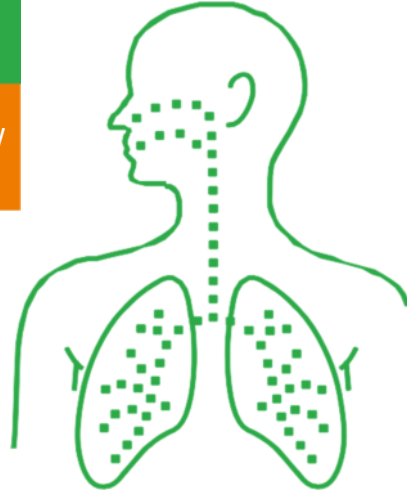

reddot design
award
winner 2012

Diep, tot in de bijholtes
binnendringende aerosolen van
droog zout voor de verlichting van:

- aandoeningen aan de
bovenste luchtwegen
- allergische symptomen



TIEF, BIS IN NEBENHÖHLEN
VORDRINGENDES TROCKENSALZ
AEROSOL ZUR LINDERUNG VON:

- BESCHWERDEN DER OBEREN ATEMWEGE
- ALLERGISCHEN SYMPTOMEN

NATUURLIJK - VEILIG & EFFECTIEF

BEVAT: KANT-EN-KLARE INHALATOR VOOR ZOUTAEROSOLEN MET ZOUTCARTOUCHE
5 GRAM NATUURLIJK, ONBEHANDELD STEENZOUT

OVER DE ZOUTTHERAPIE Bij de zouttherapie worden zoutaerosolen (in lucht opgeloste nano-zoutbestanddelen) ingeademd. Deze behandelingsmethode kan voor vrijwel alle soorten luchtwegaandoeningen worden ingezet en is voor 100% natuurlijk, wordt zeer goed verdragen en geeft geen bijwerkingen. De ingeademde zoutaerosolen werken antibacterieel en ontstekingsremmend, ziekteverwekkers op de slijmvliezen kunnen worden gedecimeerd, het vloeibaar maken van slijm wordt bevordert en zodoende wordt het afhoesten vergemakkelijkt. De behandeling kan ontstekingen in de bronchiën, de keelholte en de bijholtes verminderen en de genezing versnellen. Het inademen van zoutaerosolen verhoogt tevens het opnamevermogen van zuurstof in de longen en heeft een positief effect op het immuunsysteem.

INHALO DSI NASAL PRODUCTINFORMATIE

- De INHALO DSI NASAL bevat 5 gram natuurlijk, met de hand geselecteerd steenzout uit de zoutgroeve 'Salina Praid'. Bestanddelen in verschillende verhoudingen: natriumchloride, magnesium, calcium in de natuurlijk voorkomende vorm.
- Toepassingsgebieden: verkoudheid met verstopte neus, hooikoorts, bijholteontsteking, voorhoofdsholteontsteking alsook algemene irritaties van de bovenste luchtwegen.
- **Aromastick (alleen NASAL-versie):** De in de aromastick opgenomen etherische oliën van menthol, ricinus, eucalyptus, groene munt, pepermunt, lavendel en kruidnagel ontplooiën samen met de zoutaerosolen hun weldadige werking, zorgen voor verlichting en laten u beter doorademen.

Gebruik van de INHALO DSI NASAL, nasale inhalatie (bovenste luchtwegen)

1. Verwijder de onderste, transparante kap van de INHALO DSI NASAL.
2. Haal de aromastick uit de blisterverpakking en leg deze in de kleine, witte beschermkap.
3. Plaats hierna de kleine, witte beschermkap met de aromastick onder op de INHALO DSI NASAL en plaats hier de transparante kap overheen.



Opmerking: Was na het plaatsen van de aromastick a.u.b.

uw handen. Eventuele etherische oliëresten aan de vingers kunnen bij contact met de ogen en slijmvliezen tijdelijke irritaties veroorzaken!

4. Verwijder de beschermkap.
5. Plaats het groene neusopzetstuk van de INHALO DSI NASAL voorzichtig in uw neus en **adem diep via het apparaat in**. Houd tijdens het inademen via het apparaat het vrije neusgat dicht. Na het inademen haalt u het apparaat weer uit uw neus en ademt u via de mond weer uit. **Opmerking:** Niet in het apparaat uitademen, omdat zich hierdoor vocht in het apparaat ophoopt en de zoutkristallen kunnen gaan klonteren. Plaats na gebruik de beschermkap terug. **Dosering:** Voor een ideale werkzaamheid met aromastick gebruikt u de DSI INHALO NASAL in dagelijkse sessies van in totaal 10 minuten. U kunt de sessies geheel naar wens over de dag verdelen. Wij raden aan: 5 sessies over de dag verdeeld, van elk 2 minuten. Bij acute klachten van de bovenste luchtwegen en hevige allergische reacties kunt u het dagelijkse gebruik tot maximaal 15 minuten verlengen. Gebruik van de INHALO DSI NASAL **zonder aromastick:** Gebruik het apparaat voor een ideale werkzaamheid dagelijks 15 tot 20 minuten, bij acute klachten van de bovenste luchtwegen en hevige allergische reacties kunt u het dagelijkse gebruik tot maximaal 30 minuten verlengen.

Waarschuwingen

- **Gebruik de INHALO DSI NASAL niet in geval van een longontsteking!**
- Bij ernstige en chronische aandoeningen van de luchtwegen, hartaandoeningen en/of hoge bloeddruk alsook zwangerschap dient u voor het gebruik eerst uw arts of apotheker te raadplegen!
- U moet het apparaat bij voorkeur niet samen met andere personen gebruiken! (Wederzijdse infectie!)
- De DSI INHALO NASAL vormt geen vervanging voor medicatie en ingeval van een gelijktijdige medicamenteuze behandeling dient u uw arts of apotheker te raadplegen!
- Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het apparaat terecht kan komen!
- Niet schudden of laten vallen!
- **LET OP: Bevat kleine onderdelen die ingeslikt of ingeademd kunnen worden. Verstikkingsgevaar! Buiten het bereik van kleine kinderen bewaren!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 2 jaar! Bij kinderen onder 5 jaar wordt het gebruik van de INHALO DSI NASAL met aromastick niet aanbevolen! Kinderen onder 5 jaar dienen bij gebruik door een volwassene in de gaten te worden gehouden!
- Gebruik de aromastick van de INHALO DSI NASAL niet als u overgevoelig bent voor etherische oliën! Was na het plaatsen van de aromastick a.u.b. uw handen zorgvuldig! Eventuele etherische oliëresten aan de vingers kunnen bij contact met de ogen en slijmvliezen tijdelijke irritaties veroorzaken!

Meer informatie

- Na het eerste gebruik kan het apparaat 90 dagen resp. 3 maanden worden gebruikt.
- Droog en bij temperaturen tussen 15°C en 30°C bewaren.
- Via de QR-code, onder in het midden, gaat u naar onze homepage.
- Het chargenummer staat links onder.
- Bewaar deze patiëntinformatie.

Onderhoud Om verstoppingen door zoutkristallen te verwijderen, gebruikt u een naald of een paperclip, zodat de lucht weer ongehinderd door de filterzeef kan stromen. De behuizing van de INHALO DSI NASAL kan met een vochtige, zachte doek worden gereinigd. Het mond- resp. neusopzetstuk kan worden verwijderd en met warm water worden afgespoeld. Laat het eerst volledig drogen, voordat u het terugplaatst.

Vergunninghouder & rechthebbende en verkoop via:

INHALO DSI HUNGARY KFT. (GmbH)
VIZÖNTÖ UTCA 4, H-2030 ÉRD, HONGARIJE
www.inhalodsi.eu / info@inhalodsi.eu

Octrooi aangemeld
CE Geproduceerd in Hongarije
Medisch hulpmiddel Klasse
1

Verpakkingsinhoud: 1 stuk INHALO DSI Nasal + 1 stuk aromastick
Item No 00-100-01

Lot No

N18PA1S1A01 3 m

