

LA RÉPONSE DE LA NATURE POUR MIEUX RESPIRER

NATURE'S ANSWER TO BREATHING EASIER

# INHALO DSI™

## DRY SALT INHALER

100% NATURAL


BRONCHIAL

INHALATEUR DE SEL SEC  
POUR LE TRAITEMENT DES  
VOIES RESPIRATOIRES INFÉRIEURES

AVEC UNE CARTOUCHE DE SEL UTILISABLE PENDANT 90 JOURS

NOUVEAU

NEU

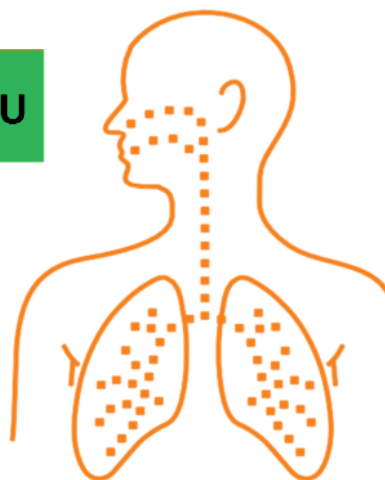

reddot design award  
winner 2012

AÉROSOL DE SEL SEC PÉNÉTRANT  
EN PROFONDEUR DANS LES  
BRONCHES POUR LE  
SOULAGEMENT :

DES DOULEURS AU NIVEAU DES VOIES  
RESPIRATOIRES INFÉRIEURES

DES SYMPTÔMES ALLERGIQUES

## NATUREL - SÛR & EFFICACE

CONTIENT : UN INHALATEUR D'AÉROSOL DE SEL SEC PRÊT À L'EMPLOI AVEC CARTOUCHE DE SEL  
5 GRAMMES DE SEL GEMME NATUREL NON TRAITÉ

**À PROPOS DU TRAITEMENT PAR AÉROSOL DE SEL** Lors du traitement par l'inhalation de sel, l'aérosol de sel (nano-composants de sel dissous dans l'air) est inhalé. Cette méthode de traitement peut être utilisée pour presque toutes les maladies respiratoires, elle est 100 % naturelle, très bien tolérée et sans aucun effet secondaire. L'aérosol de sel inhalé a une action antibactérienne et anti-inflammatoire, il peut décimer les agents pathogènes présents sur les muqueuses, favorise la liquéfaction du mucus et facilite ainsi l'expectoration. Il peut soulager l'inflammation des bronches, de la gorge et des sinus et accélérer la guérison. L'inhalation d'aérosol de sel augmente en outre l'absorption d'oxygène dans les poumons et a un effet positif sur le système immunitaire.

### INFORMATIONS PRODUIT INHALO DSI BRONCHIAL

- L'INHALO DSI BRONCHIAL contient 5 grammes de sel gemme naturel et sélectionné à la main dans la mine de sel Salina Praid. Composants dans des proportions différentes : chlorure de sodium, magnésium, calcium sous leur forme naturelle.

Indications : rhume avec toux, rhume des foins, asthme, bronchite, BPCO, toux grasse, toux du fumeur, et irritations des voies respiratoires inférieures d'une manière générale, inflammations et plaies buccales et la gorge (suite à une chirurgie dentaire, une tonsillectomie).

#### Utilisation de l'INHALO DSI BRONCHIAL

*Inhalation orale (voies respiratoires inférieures)*

1. Ôtez le capuchon de protection.
2. Couvrez l'embout buccal orange avec vos lèvres et inspirez profondément à travers l'appareil.
3. Après l'inspiration, sortez l'INHALO DSI BRONCHIAL de la bouche et expirez par le nez.



**Remarque :** N'expirez pas dans l'appareil, autrement l'humidité s'y accumulerait et les cristaux de sel s'aggloméreraient. Remettez le capuchon de protection après utilisation. **Recommandation :** Buvez quelques gorgées d'eau avant utilisation pour humidifier les muqueuses buccales. Ne buvez pas immédiatement après utilisation, patientez 5 minutes. **Posologie :** Pour une efficacité optimale, utilisez l'INHALO DSI BRONCHIAL en applications quotidiennes de 15 à 20 minutes au total.

Vous pouvez répartir les applications sur la journée, comme vous le souhaitez. Nos recommandations : 4 applications réparties sur la journée, de 4 à 5 minutes chacune. En cas de symptômes aigus des voies respiratoires/de refroidissement, de crises allergiques, vous pouvez augmenter la durée d'utilisation quotidienne jusqu'à 30 minutes. Après utilisation, vous pouvez noter un goût légèrement salé en bouche pendant quelques minutes. C'est parfaitement normal et cela prouve que l'aérosol de sel a été inhalé et que vous avez utilisé correctement l'INHALO DSI BRONCHIAL.

#### Mises en garde

- **Ne pas utiliser l'INHALO DSI BRONCHIAL en cas d'inflammation pulmonaire !**
- En cas de maladies respiratoires graves et chroniques, de maladies cardiaques et/ou d'hypertension artérielle et en cas de grossesse, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien avant toute utilisation !
- Il est déconseillé d'utiliser un même appareil simultanément pour plusieurs personnes ! (contagion !)
- L'INHALO DSI BRONCHIAL ne saurait se substituer à un médicament et, en cas de thérapie médicamenteuse parallèle, son utilisation doit faire l'objet d'une consultation avec votre médecin ou votre pharmacien !
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil !
- Ne pas secouer ni laisser tomber !
- **ATTENTION : Contient des petites pièces qui peuvent être ingérées ou inhalées. Risque de suffocation ! Conserver hors de portée des enfants en bas âge !** Ne pas administrer à un enfant de moins de 2 ans ! Pour les enfants de moins de 5 ans, une surveillance par un adulte est recommandée lors de son utilisation !

#### Autres informations

- Après la première utilisation, l'appareil peut être utilisé pendant 90 jours ou 3 mois.
- Stockez dans un endroit sec, à des températures comprises entre 15 °C et 30 °C.
- Utilisez le code QR en bas, au centre, pour accéder à notre page d'accueil.
- Le numéro de lot figure en bas à gauche.
- Conservez ces informations concernant le patient.

**Entretien** Pour éliminer les obstructions liées aux cristaux de sel, utilisez une aiguille ou un trombone pour laisser l'air circuler à nouveau librement à travers la grille du filtre. La partie externe de l'INHALO DSI BRONCHIAL peut être nettoyée au moyen d'un chiffon doux et humide. L'embout buccal ou nasal peut être ôté et rincé à l'eau courante chaude. Laisser sécher soigneusement avant le montage.

**Détenteur du certificat d'homologation et des droits, et distribué par :**

**INHALO DSI HUNGARY KFT. (GmbH)**

VIZÖNTŐ UTCA 4, H-2030 ÉRD, HONGRIE

CE En attente de brevet  
Fabriqué en Hongrie, UE  
Produit médical Classe 1

Contenu de l'emballage : 1 pièces INHALO DSI Bronchial

Article n° 00-200-01

Lot N° B18PA1S1AO1

