

Reinigung und Pflege

- Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch und ggf. mit einem Neutralreiniger, nach jeder Benutzung trocken wischen.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, Säuren oder Laugen. Diese greifen das Material an.
- Bei Verschmutzungen mit infektiösen Material kann mit üblichen Flächendesinfektionsmitteln desinfiziert werden.

Bitte entsorgen Sie die Toilettensitzerhöhung auf eine umweltgerechte Art über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.
Beachten Sie die aktuell geltenden gesetzlichen Vorschriften!

Modellnummer: 9001A WEINBERGER GmbH & Co. KG
Art.-Nr.: 43522 Bergische Str. 11
L.-Nr.: 4009 42781 HAAN



weinberger®

Toilettensitzerhöhung mit Schraubverschluss



- Praktische Toilettensitzerhöhung für alle handelsüblichen Toilettenbecken
 - durch Schraubverschluss ohne Werkzeug schnell und einfach auf der Toilette zu befestigen
 - hygienische Sitzfläche
 - Anti-Rutsch-Auflagen an den seitlichen Verschlüssen
 - erhöht den Sitz um 12,7 cm
 - Hygieneausschnitt vorn für optimale Intimhygiene
 - leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- Produktmaße: 42,5 x 39,5 x 13,5 cm / 16 (inkl. Befestigung)
• Gewicht: 1,6 kg
• Maximale Belastbarkeit: 160 kg

Liebe Kundin, lieber Kunde,

hiemit beglückwünschen wir Sie zum Erwerb Ihrer neuen praktischen Toilettensitzerhöhung. Sie sorgt für mehr Sicherheit und Komfort und lässt sich schnell und einfach auf der Toilette befestigen. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese zum Nachschlagen auf.

Sicherheitshinweise:

- Achten Sie auf die maximale Belastbarkeit von 160 kg. Die Toilettensitzerhöhung ist nicht zum Dauersitzen geeignet.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor und befestigen Sie keine zusätzlichen Elemente.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Tritt-/ Leiterersatz.
- Benutzen Sie es nicht an anderen Möbelstücken oder Einrichtungsgegenständen.
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch vorgesehen. Für die gewerbliche Nutzung in Kliniken, Altenheimen etc. ist es nicht geeignet.
- Dieser Toilettensitzerhöhung nur an Toiletten montieren, die eine stabile Auflage gewährleisten. (Keine Campingtoiletten)
- Überprüfen Sie vor der Benutzung, dass die Toilettensitzerhöhung sicher und rutschfest steht.
- Prüfen Sie das Gerät regelmässig auf seinen Zustand. Kontrollieren Sie alle Verschraubungen und ziehen Sie den Schraubverschluss fest an.
- Verwenden Sie die Toilettensitzerhöhung nur im technisch einwandfreien Zustand. Entfernen Sie beschädigte Toilettensitzerhöhungen sofort von der Toilette.

Aufbau und Installation:

1. Entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung. Enthalten sind:
1 x Toilettensitzerhöhung
3 x Klemmen mit Schraubverschluss
- 2) Klappen Sie beide Toilettendeckel hoch. (Die Montage der Toilettensitzerhöhung erfolgt direkt auf dem WC-Becken).
- 3) Drehen Sie die Toilettensitzerhöhung um und schieben Sie eine Klemme in die vorgesehene Führung. Die Befestigungsschraube muss in das Gewinde führen. Schrauben Sie die Klemme leicht an. **NOCH NICHT FESTZIEHEN!** Montieren Sie die restlichen Klemmen und drehen Sie danach die Toilettensitzerhöhung um.
- 4) Legen Sie die Toilettensitzerhöhung nun passgerecht auf das WC Becken und schrauben Sie nun die Klemmen fest.



Bitte vergewissern Sie sich, dass die Toilettensitzerhöhung sicher, stabil und fest sitzt und alle Klemmen fest angeschraubt sind.



Verwenden Sie den Sitz erst nach Prüfung!
Bei Nichtbenutzung ist der Sitz entsprechend abzuschrauben